

Передача данных

Отправка и получение данных после проведения процедуры

Система LUCAS собирает данные о состоянии и использовании устройства, которые могут быть настроены в соответствии с протоколами медицинского учреждения.

Эти данные можно передавать с помощью соединения Bluetooth® или сети Wi-Fi®.

Для отправки данных устройства и получения новых настроек используется кнопка ПЕРЕДАЧИ данных.

Чтобы передать данные:

- ✓ Убедитесь, что устройство LUCAS выключено
- ✓ Нажмите кнопку ПЕРЕДАЧИ данных



Отчет по процедуре

Отправка и получение данных после проведения процедуры



Отчет по процедуре (в формате PDF) можно отправить на любые заданные адреса электронной почты.

Для отправки отчета по процедуре необходимо:

- Разместить устройство LUCAS в диапазоне действия определенной сети Wi-Fi
- Нажать кнопку ПЕРЕДАЧИ данных (питание устройства LUCAS должно быть ВЫКЛЮЧЕНО)
 - Возможна настройка автоматической отправки отчета, когда устройство находится в режиме ожидания или зарядки (дополнительная опция)
- Отчет будет автоматически доставлен на электронную почту администратора устройства, адреса других получателей необходимо добавить вручную

